


EVI GPS-BOKS

Stella Care beskytter personer med demens mot å gå seg bort. Vi tilbyr et lokaliseringssystem og GPS-enheter i verdensklasse. Det gir demensrammede frihet, og det skaper trygghet for pårørende og pleiepersonalet.

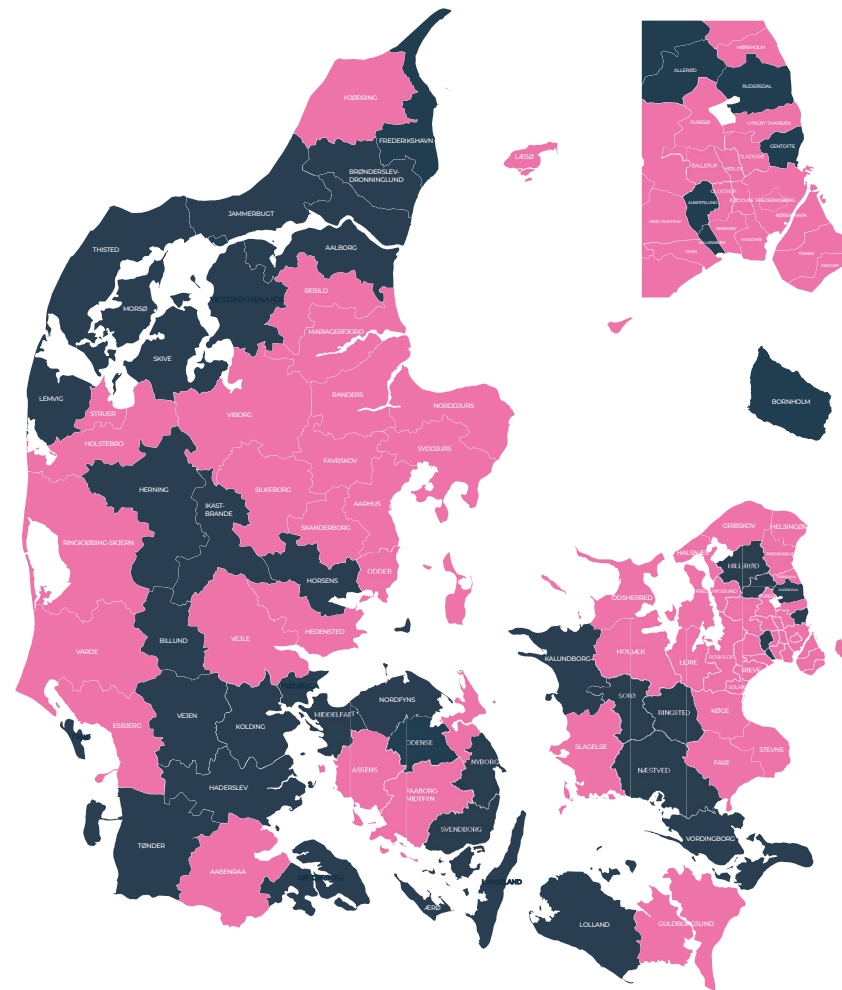

Takk for at du valgte Care Tracker-systemet fra Stella Care.

Vi vil gjøre vårt beste for å sikre at du er fornøyd med produktet vårt og får optimal frihet ut av det.

I STELLA CARE KJEMPER VI FOR...

... at ingen med demens skal forsvinne sporløst.

Alle må være trygge, både den som har demens, pårørende og pleiepersonale.

Derfor vil vi være best på å utvikle enheter som kan lokalisere personer med demens.

ENKELT OG ATTRAKTIVT

Vår løsning er enkel å bruke og attraktiv for personen med demens å bruke. Det gjør at den demensrammede raskt føler at produktet er en naturlig del av hverdagen.

DU KAN ALLTID FÅ HJELP

Det er viktig for oss at du alltid føler deg trygg, derfor kan du ringe oss døgnet rundt.

Vi kan alltid kontaktes på: info@stellacare.dk eller +45 42 42 90 60.

LITEN, ELEGANT OG VAKKER. FULL AV FUNKSJONER

Med Evi GPS-boksen får du en liten, men svært presis GPS-enhet. Evi er full av funksjoner, måler bare 6,1 x 4,4 x 1,6 cm og veier 35 gram. Det er 2 alarmtrykk på enheten, slik at du kan ringe 2 forskjellige numre fra den.

PRODUKTEGENSKAPER

Tid mellom nye posisjoner under aktiv sporing	15 sek.*
Batteritid	40-60 timer
Mulighet for geofence (ned til)	20 meter
Sporing via brukervennlig app på telefon, PC eller nettbrett	Ja
Vanntett*	IP67*
Mulighet for toveistale	Ja
Halskant inkludert	Ja
Lader og ledning til lading medfølger	Ja

* Du kan ta Evi inn i dusjen eller rengjøre/vaske den i lunkent vann. Skulle du ved et uhell sette apparatet i vaskemaskinen eller miste apparatet i toalettet, tåler det typisk dette også.



VEILEDNING

Hvis enheten er tom for strøm, vil den automatisk slå seg på når den har sittet til lading i 10 minutter.

Du kan se at enheten slås på ved at alle lysdioder blinker én gang, så starter enheten etter 20 sekunder.



SE OM ENHETEN ER PÅ

Hvis de små lysdiodene, over SOS-knappen, blinker blått og grønt, er enheten på. Ved lavt batteri vil den lille røde lysdioden blinke raskt.

SLIK SLÅR DU PÅ ENHETEN

Enheten slås på ved å holde inne knappen øverst på siden i ca. 1 sekund. Hvis den ikke slår seg på, kan det skyldes at den mangler strøm.

SLIK LADER DU ENHETEN

Enheten plasseres i laderen som vist på bildet. Når enheten har vært til lading i ca. 10 minutter, slås den på automatisk. Du kan se at enheten lader opp når SOS-knappen pulserer rødt.


Når SOS-knappen slås av og den lille lysdioden rett over SOS-knappen lyser konstant rødt, er enheten fullladet. En full lading tar 3 timer. Etter en time er batteriet omtrent 90 % ladet

SLIK RINGER DU FRA EVI

SOS-knappen holdes nede i ca. 3 sek., og så vibrerer enheten og SOS-knappen pulserer.

Samtalen kan bare kan avsluttes av mottakeren.

* Vi oppdaterer kontinuerlig funksjoner, ny funksjonalitet, samt instruksjoner på nettstedet vårt. Derfor råder vi deg til å se på www.stellacare.dk/guidelines, for mer informasjon. Noen funksjoner må aktiveres før bestilling, kontakt Stelle Care for å høre mer om våre forskjellige alternativer.

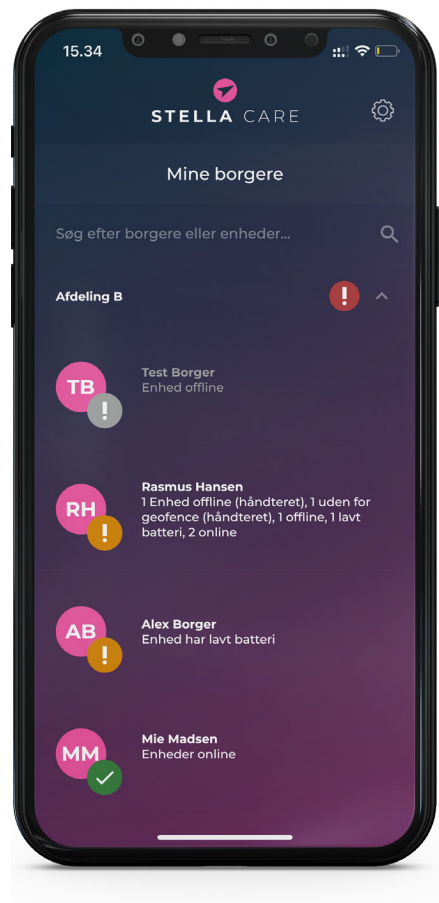

SLIK BRUKER DU APPEN

Det eneste du trenger er en GPS-enhet og vår app.


GPS-enheten bæres av personen med demens. Appen brukes av helsepersonell eller en pårørende.

Last ned appen vår fra App Store eller Google Play først. Søk etter "**Stella Care**" og velg appen "**Stella Care**".

Når du er logget inn i appen, får du en oversikt over brukerne du har tilgang til å følge. De fleste brukerne har bare én enhet, men noen har flere. Du kan bruke søkeboksen for å finne brukere hvis du har tilgang til flere.

Listen over brukere er sortert etter kritikalitet.

- Rød – Geofence-larm
- Grå – Offline
- Gul – Batterilarm
- Grønn – Allt är ok

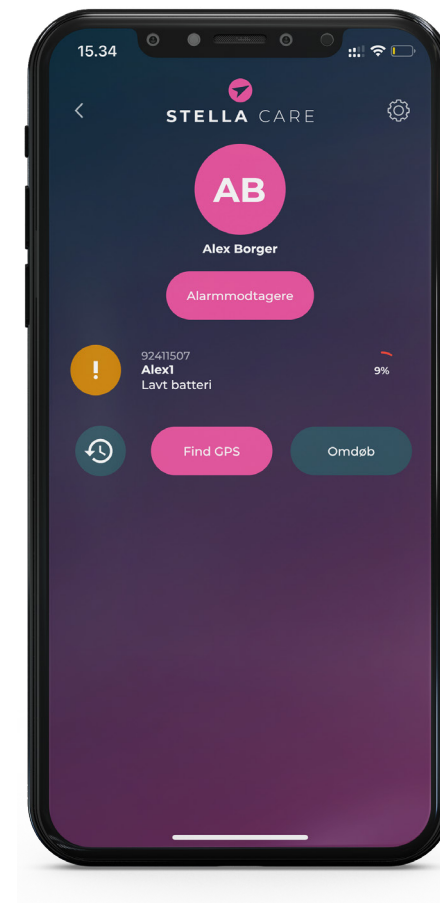


SLIK FINNER DU EN BORGER

VÄLJ DEN ANVÄNDARE SOM DU VILL HITTA I DEN FÖREGÅENDE LISTAN. DU SER NU EN ÖVERSIKT ÖVER ANVÄNDARENS ENHETER.

TRYCK PÅ DEN AV ANVÄNDARENS ENHETER SOM DU VILL HITTA.

DU HAR NU MÖJLIGHET ATT:

- > **Vis enhetens historikk** – Hvis du trykker på ikonet,  vil det være mulig å se en historikk over alarmer og samtaler til og fra enheten.
- > **Finn GPS** – Her kan du se GPS-enhetens nåværende posisjon på et kart. Brukerens posisjon oppdateres automatisk hvert 15. sekund hvis du søker etter brukeren.
- > **Bytt navn** – Under "Bytt navn" har du muligheten til å endre enhetens navn. For eksempel, Natt og Dag.
- > Lengst til høyre kan du se hvor mye batteri enheten har i prosent.
- > Under hver enhet vises enhetens ID-nummer og status, for eksempel geofence, lavt batteri, OK eller frakoblet.
- > Hvis det er flere personer som mottar alarmer for brukeren, har du muligheten til å se hvem som er registrert som alarmmottaker ved å trykke på "**alarmmottakere**."

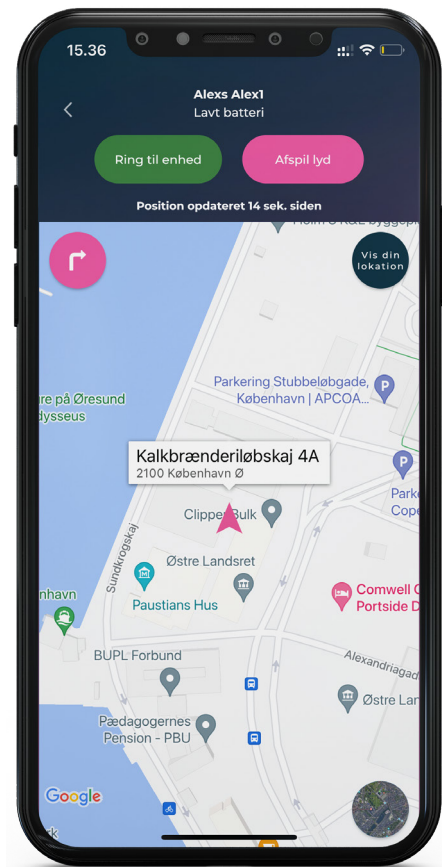

SLIK SER MAN BRUKERENS POSISJON PÅ ET KART

Hvis du vil se enhetens posisjon på et kart, trykker du på "Finn GPS."


Når du har trykket på "Finn GPS" i oversikten over brukers enheter, vil du få en kartvisning som viser hvor brukeren/enheten befinner seg.

Øverst på siden vises brukers navn, enhets status, og når enheten sist sendte sin posisjon til systemet. Ved å trykke på knappen "Ring til enhet" starter du et samtale til brukers enhet. Enheten kobler selv opp samtalen.

Hvis du har problemer med å finne enheten, kan du trykke på knappen "Spill opp lyd" for å få enheten til å spille av lyd i 20 sekunder, slik at den kan bli funnet igjen.

PÅ KARTET HAR DU FØLGENDE MULIGHETER

-  Se din egen posisjon på kartet. Den blå prikken viser din posisjon.
-  Trykk på denne for å se brukers nåværende adresse/posisjon.
-  Her kan du veksle mellom vanlig kart og satellittkart.
-  Trykk på denne knappen for å få veibeskrivelse til enhets posisjon.

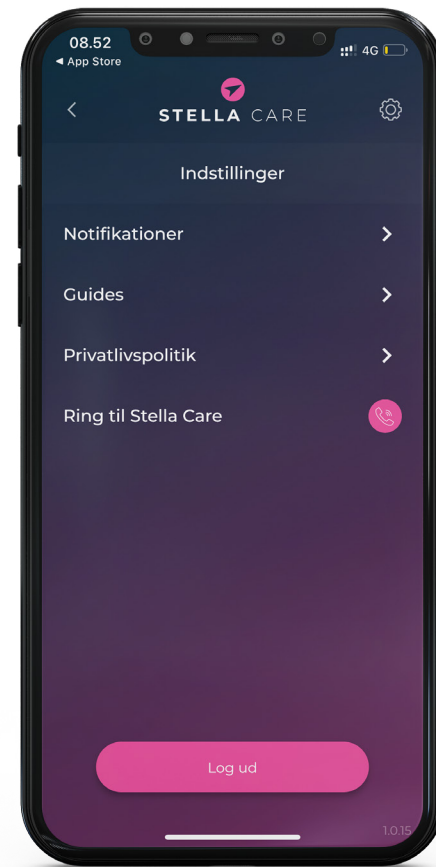

SLIK ENDRER DU INNSTILLINGENE DINE

I appen kan du gjøre flere innstillinger for kontoen din.

- > **Meldinger** – Her kan du aktivere eller deaktivere vibrasjon og lyd ved alarmer eller endre lyden for de ulike alarmene.
- > **Veiledninger** – Hvis du er usikker på hvordan du skal bruke enheten, appen eller administrasjonssystemet, finner du veiledning om hvordan du gjør dette her.
- > **Personvernpolicy** – Les om personvernpolicyen for bruk av appen.
- > **Ring Stella Care** – Hvis du har problemer med appen eller har noen spørsmål, kan du alltid kontakte oss ved å trykke her. Kundeservicen vår er åpen døgnet rundt, hele året.



STELLA CARE

Vi designer og utvikler systemer som skaper trygghet og frihet
for personer med demens, pleiepersonale og pårørende.

Vårt oppdrag er å være best i verden til å finne
folk som er savnet.

Stella Care ApS | Tlf. 42 42 90 60 | www.stellacare.dk